

מד-חום ללא מגע המשווק על ידי חברת פנגיה בע"מ

דגם PANGEA AICARE 66A/ZMT

הסבר הלכתי:

המדחום מתוכנת לבצע מדידת חום בכל כמה שניות ויציג את הטמפרטורה על המסך באופן אוטומטי.

הנחיות:

לפני שבת

- ✓ לשימוש במקום קבוע יש לחבר את המדחום לחשמל. ניתן להשתמש גם כמכשיר נייד על סוללות. יש לקחת בחשבון שהסוללות תחזקה מעמד בין 2-7 ימים בלבד עקב ניצול חשמל גבוה יותר במנגנון השבת.
- ✓ רצוי להשתיק את הצפצוף לפני שבת ע"י לחיצה על לחצן השתקה.
- ✓ רצוי למקם את המדחום במקום קבוע ויציב.

בשבת

- ✓ יש להחזיק את המדחום ליד מצח הנבדק ולהמתין כ-4 שניות. תוצאת המדידה תופיע על הצג מיד לאחר המדידה.
- ✓ אין לגעת בלחצנים בשבת.
- ✓ ניתן להחזיק את המדחום ביד ולקרר את המדחום למצח הנבדק.
- ✓ יש צורך להתקרב למרחק של בין 5 ל 10 ס"מ מראש אקדח המדחום.



הרב מנחם פרל

ראש מכון צומת